



# Similasan

V0.9d B50E2680

## Augenlid-Reinigungstücher

### OPHTHALMISCHE TÜCHER

14 Einweg-Tücher zur Behandlung der Augenpartie bei Erwachsenen und Kindern. Steril.

Frei von Konservierungsstoffen, Parabenen und Parfüm.

Augenlid-Reinigungstücher wurden speziell für Patienten mit sensibler Haut, Augenlider und Augen entwickelt.

### INDIKATIONEN

Augenlid-Reinigungstücher sind für die lokale tägliche Behandlung der Augenpartie, einschliesslich Augenlider und Wimpern, bei Erwachsenen und Kindern mit empfindlicher Haut, Augenlidern und Augen bestimmt, um:

- Verschmutzungen und Absonderungen / Sekrete zu entfernen, die von Allergien, Entzündungen, Infektionen (z. B. Blepharitis, Blepharokonjunktivitis, Hordeolum / Gerstenkorn, Chalazion) oder Augenoperationen herrühren.
- Fremdkörper (z. B. Pollen, Staub, Make-up) zu entfernen.

Augenlid-Reinigungstücher eignen sich zur Reinigung der Augenlider bei trockenen Augen (z. B. Funktionsstörung der Meibomschen Drüse). Augenlid-Reinigungstücher eignen sich zur Verwendung während der prä- oder postoperativen Phase der refraktiven Laser-Augenchirurgie, der Kataraktchirurgie und therapeutischer Injektionen in die Augen.

Augenlid-Reinigungstücher sind aufgrund ihrer besonders irritationsarmen Formulierung auch für Kontaktlinsenträger geeignet.

- Einfache Anwendung
- Kein Spülen nach der Anwendung
- Ausgeglichener osmotischer Druck
- Isolacrimaler pH-Wert
- Nicht fettend

### EIGENSCHAFTEN

Augenlid-Reinigungstücher sind weiche Tücher zur täglichen lokalen Behandlung der Augenpartie. Sie wurden speziell für Patienten mit empfindlicher Haut, Augenlider und Augen entwickelt.

Augenlid-Reinigungstücher eignen sich zur optimalen mechanischen Entfernung von Verschmutzungen, Absonderungen / Sekreten und Fremdkörpern unter vollumfänglicher Rücksichtnahme auf die Physiologie der Augenpartie, die besonders empfindlich und sensibel ist.

### ZUSAMMENSETZUNG

Weiche Tücher, getränkt in einer Lösung aus: Wasser, Propylenglykol, Cocoylweizen-Aminosäuren, Glycerin, Natriumchlorid, Camellia sinensis (Tee)-Blattextrakt, Natriumcitrat, Zitronensäure.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

Nachdem Sie Ihre Hände sorgfältig gereinigt haben, öffnen Sie den Beutel und ziehen Sie das Tuch heraus. Wenden Sie das Tuch im Bereich des Augenlids an und wischen Sie diesen vorsichtig ab, um eine ausreichende Reinigung, Entfernung von Verschmutzungen, Absonderungen / Sekreten und Fremdkörpern im Augenbereich zu ermöglichen. Bei besonders hartnäckigen Sekreten oder dem Verschluss eines Tränenkanals ist es ratsam, den geschlossenen Beutel einige Minuten in lauwarmem Wasser (ca. 40 °C) zu erwärmen und das Tuch dann als warme Kompresse zu verwenden, um den Bereich sanft zu massieren.

Andererseits ist es im Falle einer Entzündung ratsam, den Beutel einige Stunden im Kühlschrank abzukühlen und dann das offene Tuch am Auge anzuwenden, wobei es einige Minuten als kalte Kompresse an Ort und Stelle verbleibt.

Nach Gebrauch muss nicht gespült werden.

### WARNHINWEISE

Die Produktsterilität ist nur bei intaktem Beutel garantiert.

Das Tuch ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Es wiederzuverwenden, kann eine Infektion verbreiten.

An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.

Das Einweg-Tuch kann aufgrund der natürlichen Pflanzenextrakte seine Farbe verändern. Dies ist normal.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Zur äusseren Anwendung.

Unterbrechen Sie die Behandlung bei offensichtlicher Reizung oder Überempfindlichkeit gegen das Produkt.

Verwenden Sie im Falle einer Infektion das gleiche Tuch nicht für beide Augen.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisungen sorgfältig durch.

 Promeia Italia Srl  
MIND Viale Decumano, 36  
20157 Milano (MI), Italy  
[www.promeia.com](http://www.promeia.com)

### DISTRIBUTOR

SANOVA Pharma GesmbH,  
Haidestrasse 4, A-1110 Wien

Letzte Überarbeitung des Textes  
25. Oktober 2022.

### WICHTIGER HINWEIS

Bei "Eye Wipes Sensitive" (CH) und "Augenlid-Reinigungstücher" (AT) handelt es sich um verschiedene, landesspezifische Namen desselben Produkts.

 0425

**STERILE R**

